



Výrobce:

Yetrue Bussiness (Schenzhen) Limited
4th floor, tianshu warehouse, wanke
online, wuhe south rd, bantian,
longgang district, schenzhen, china
(518131)

Dovoz a prodej:

Servatech s.r.o.
Záběhlická 134/95, Praha 10
106 00, Česká republika
Email: info@servatech.cz
Tel: +420 277 279 330

YETRUE

Respirátor

FFP2 NR

Model: N9CS2

5 ochranných vrstev, 2 filtrační

EN149:2001 + A1:2009

DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

CE 0598




Ochrana před prachem, viry
i bakteriemi




Příjemný i pro
citlivou pokožku



Perfektně anatomicky
přiléhá na obličej

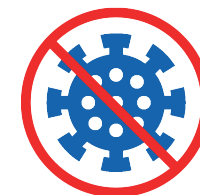

Certifikováno proti
COVID-19

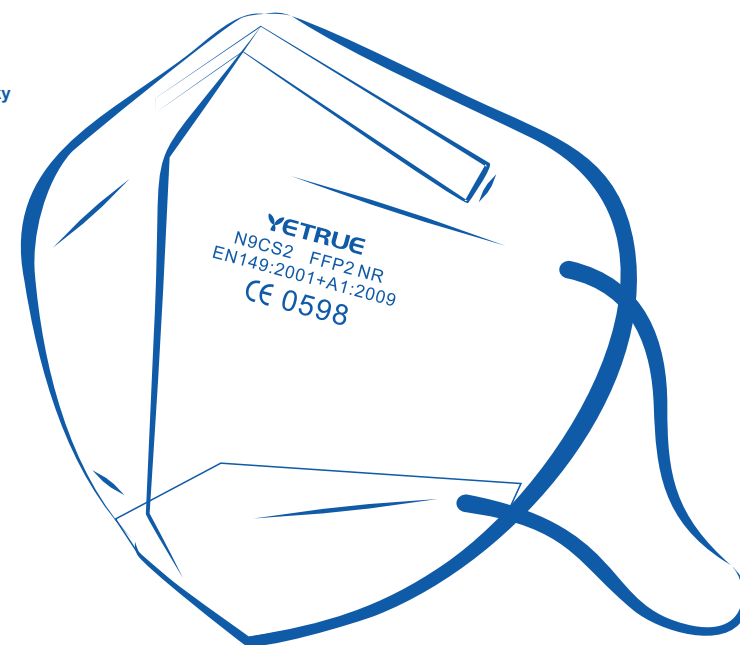


Návod k použití Respirátoru FFP2

Model: N9CS2

Dovozce: Servatech s.r.o. www.servatech.cz

Prosím, přečtěte si tento informační štítek před použitím produktu. Tento respirátor je vyroben na ochranu před COVID-19 podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Respirátor N9CS2 disponuje ochranným faktorem FFP2 definovaným v EN 149:2001 + A1:2009.

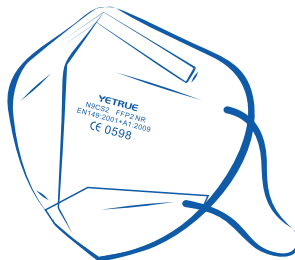

Před použitím zkontrolujte

Respirátor musí být správně vybrán pro zamýšlené použití. Zkontrolujte masku, zda není poškozená a bez viditelných vad. Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo data expirace (viz obal). Zkontrolujte, zda je třída ochrany vhodná k použití v daném prostředí. Masku nepoužívejte, pokud je vadná nebo byla překročena doba použitelnosti. Tento respirátor je navržen tak, aby zajišťoval ochranu proti pevným i kapalným aerosolům.

Respirátor je většinou jednorázová pomůcka, kterou je třeba po použití nebo po kontaminaci zlikvidovat. Pokud nedojde k potřísnění krví nebo poškození respirátoru, pohybuje se doba použitelnosti v řádu hodin, většinou vydrží osmihodinovou směnu. Záleží na koncentraci v prostoru.

Plnosvous nebo vousy a určité rysy obličeje mohou snížit účinnost tohoto respirátoru. Respirátor nepoužívejte v místech s rizikem požáru nebo výbuchu.

Respirátor lze opakovaně sundat a znovu nasadit, ale je třeba manipulovat s ním tak, aby se člověk nedotýkal přední části a nekontaminoval respirátorem povrchy. Respirátor se ovládá za tkanice či za gumičky. Respirátory nejsou určeny k dezinfekci.

Návod k nasazení respirátoru



1. Respirátor rozevřete a vytvarujte dle obličeje.



2. Přiložte respirátor k obličeji.



3. Nasadte upínací pásky kolem uší.



4. Přimáčkněte flexibilní svorku kolem nosu tak, aby byl respirátor utěsněn.



5. Zkontrolujte dokonalé utěsnění, přes respirátor se nadechněte a energicky vydechněte. Pokud kolem nosu proudí vzduch, nosní sponu více přitlačte a vytvarujte. Pokud vzduch uniká kolem okraje, přemístěte ušní smyčku tak, aby lépe seděla. Proces kontroly opakujte, dokud není maska správně utěsněna.

Po použití

Jednotlivé respirátory po použití zabalte do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku a vhodte do směsného odpadu určeného pro spalení nebo odpadu s označením biologicky nebezpečný/kontaminovaný.

Po jakékoli manipulaci s respirátorem by měla následovat dezinfekce rukou, případně umytí rukou teplou vodou a mýdlem.

Varování


1. Nedodržení všech pokynů a omezení používání tohoto produktu, může mít za následek poškození zdraví.
2. Správně vybraný respirátor je nezbytný pro ochranu vašeho zdraví. Před použitím tohoto respirátoru se poraďte s kvalifikovaným odborníkem v oblasti bezpečnosti, abyste zjistili, zda je produkt vhodný pro váš zamýšlený účel.
3. Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v přiměřeně větraných prostorách obsahujících dostatek kyslíku pro podporu života. Nepoužívejte tento respirátor, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5%.
4. Výrobek není odolný vůči ohni a nesmí se používat v prostorech s otevřeným ohněm a prostorech s nebezpečím výbuchu.
5. Okamžitě opusťte pracovní prostor, pokud: a) pocítíte ztížené dýchání nebo b) objeví se závratě nebo jiné zdravotní potíže.
6. Plnosvous nebo vousy a určité rysy obličeje mohou snížit účinnost tohoto respirátoru.
7. Tento respirátor nikdy žádným způsobem neupravujte ani nemodifikujte (kromě případů uvedených v pokynech)
8. „NR“ znamená, že tato polomaska filtrující částice nesmí být použita pro více než jednu směnu. Není nutná žádná údržba. Po použití respirátor zlikvidujte.
9. Doba, po kterou může být tento respirátor použit, závisí na přítomných kontaminujících látkách a neměla by přesáhnout jednu směnu. Pokud je dýchání obtížné, vyměňte respirátor dříve.
10. Do použití nechte respirátory v obalu a mimo přímé sluneční světlo nebo kontaminující látky. Podmínky skladování se musí držet v rozsahu teploty mezi -30°C až +70°C a relativní vlhkosti <80%.
11. Pokud není respirátor nasazen podle „Návod k použití“, respirátor neposkytuje očekávanou úroveň ochrany.
12. Tento respirátor je vhodný k ochraně před netoxickým pevným a kapalným aerosolem.
13. Pokud nedosáhnete správného utěsnění respirátoru, může to mít za následek vážné poškození zdraví.
14. Respirátory musí být skladovány a přepravovány v původním obalu a v doporučené skladovací teplotě a vlhkosti dle doporučení výrobce.

Skladování:



2023/03

Datum expirace

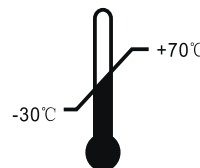

Teplota skladování a použití



Vlhkost skladování a použití

EU prohlášení o shodě k výrobku naleznete na: www.servatech.cz/navody ve složce Respirator Yettrue